


Лампа для световой полимеризации Ortholux™ Luminous

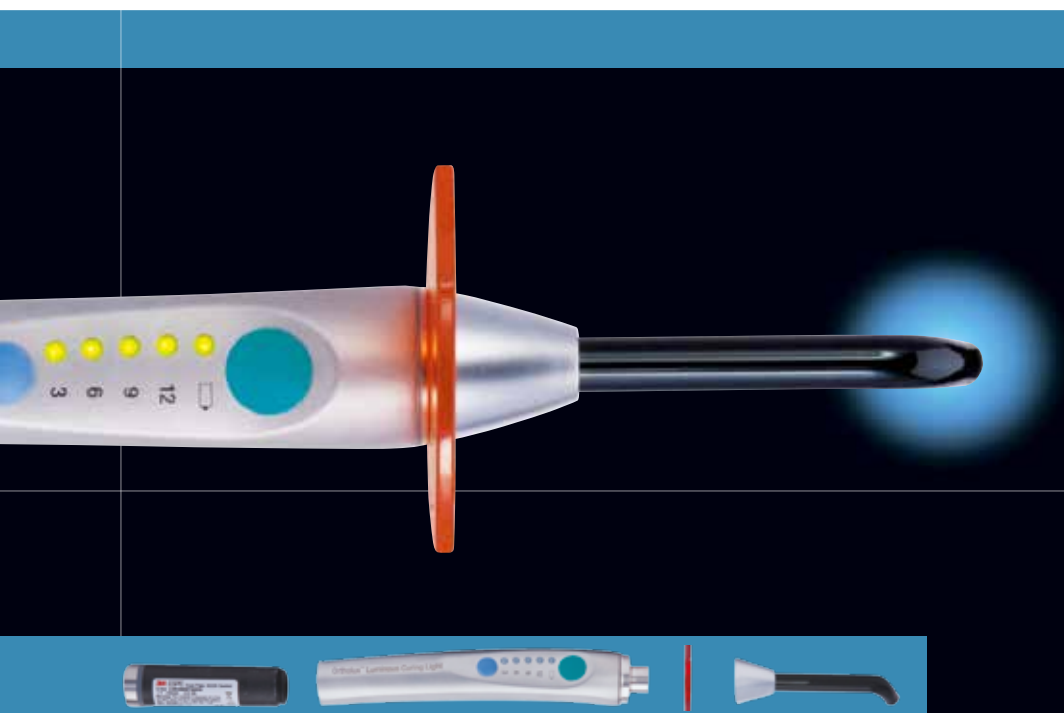

Полимеризация за 3 секунды

С новой светодиодной технологией это возможно!

Беспроводная полимеризационная лампа Ortholux™ Luminous изменит ваше представление об эффективности световой полимеризации в ортодонтическом лечении. Лампа имеет удобную конструкцию, эргономична и является последней разработкой в области высоко-мощных светодиодных технологий. Благодаря улучшенному оптоволоконному световоду достигается мощность излучения 1600 мВт/см² на выходе.

- Изящный и прочный литой корпус из нержавеющей стали
- 3-х секундная полимеризация при фиксации керамических брекетов для экономии времени врача и пациента
- Высокая мощность 1600 мВт/см²
- Встроенный индикатор интенсивности светового потока
- Литий-ионный аккумулятор с возможностью подзарядки



3M Unitek

Лампа для световой полимеризации Ortholux™ Luminous

Прочность, долговечность и гигиеничность

Стильный литой корпус из нержавеющей стали обладает грязеотталкивающими свойствами и легко чистится. Отсутствие швов и отверстий предохраняет внутренние компоненты от загрязнений и попадания влаги.

Быстрая и точная полимеризация

Световод 8 мм. обеспечивает интенсивность светового потока 1600 мВт/см² при соблюдении рекомендованных методик: полимеризации с медиальной и дистальной сторон или, как альтернатива, межпроксимальной технике полимеризации. Черное покрытие световода гарантирует, что синий свет высокой интенсивности направляется исключительно в полость рта пациента и не рассеивается. В результате полимеризация адгезива под керамическими и металлическими брекетами происходит за 3 и 6 секунд соответственно. Это сокращает общее время фиксации и время нахождения пациента в кресле.

Улучшенная эргономика

Лампу удобно удерживать в руке под различными углами, а ее небольшие размеры обеспечат превосходный баланс веса. Уникальная V-образная форма подойдет для любой техники полимеризации. Для дополнительной маневренности световод снабжен магнитным креплением, что способствует его быстрой и легкой фиксации, извлечению и позиционированию. Защитный экран вращается на 360°, что обеспечивает надежную защиту глаз.

Интуитивное управление

В дополнение к простому управлению двумя кнопками, устройство имеет встроенный таймер, предлагающий на выбор 4 варианта времени засвечивания (3, 6, 9 и 12 сек.).

Мощный аккумулятор

Высокопроизводительный литий-ионный аккумулятор поддерживает постоянную интенсивность светового потока, сохраняя при этом до 2-х раз больше энергии, чем никель-металл-гибридные аналоги.

Отлично подходит для пациентов

Для удобства пациентов настройки лампы Ortholux™ Luminous позволяют полностью отключить звуковые сигналы, что делает процесс полимеризации абсолютно бесшумным.

Лампа Ortholux™ Luminous и запасные части



704-450
Лампа для световой полимеризации Ortholux™ Luminous



704-455
Аккумулятор



704-456
Световод



704-457
Защитный экран

Аппаратура	Адгезив	Лампа для световой полимеризации Ortholux™ Luminous
Металлические брекеты	Адгезив Transbond™ XT	3 секунды мезиально x 3 секунды дистально
Керамические брекеты	Цветоизменяющийся адгезив Transbond™ PLUS	3 секунды через брекет
Щечные трубки (прямой способ фиксации)	Система APC™ Plus	6 секунд мезиально x 6 секунд окклюзионно
Несъемные ретейнеры	Адгезив Transbond™ LR	3 секунды мезиально x 3 секунды дистально
Бандажные кольца	Адгезив для колец Transbond™ Plus Стеклоиономерный цемент двойного отверждения Unitek™	12 секунд (3 секунды на бугор)
Каппы для непрямо́й фиксации (металлические брекеты)	Адгезив Transbond™ LV низкой вязкости	6 секунд мезиально x 6 секунд дистально через каппу
Каппы для непрямо́й фиксации (керамические брекеты)		6 секунд через брекеты и каппу

Ортодонтическая продукция 3М Россия
121614, Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3munitek.ru

Клиентский центр
192029, Россия,
г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, 70,
корп. 3/А, 5 этаж
Бизнес-центр «Фидель»
Тел.: +7 (812) 33 66 222
Факс: +7 (812) 33 66 444

Клиентский центр
620142, Россия,
г. Екатеринбург,
ул. Большакова, 70
БЦ «Корин», 6 этаж
Тел.: +7 (343) 310 14 30
Факс: +7 (343) 310 14 29